

# 브레스윗® 알러지블로커

Drug-Free 제품 **의료기기**

## 알러지 유발물질 방지 스프레이

### 제품명 · 모델명

BRETHWIT ALLEGY BLOCKER MINT  
(브레스윗 알러지 블로커 민트)

**품목명** 점착성투명창상피복재

**품목하기번호** 수허 16-405호

**사용목적** 코 점막에 뿌려 물리적인 방어막을 형성함으로써 비강으로 흡입되는 알러지 유발물질에 대한 오염 방지 및 보호

**원재료** 하이드록시프로필 메틸셀룰로오스(HPMC) 민트파우더

### 사용방법

#### 1. 사용전의 준비사항

- 1) 제품의 포장에 파손이 없는지 확인한다.
- 2) 제품의 외관상 변형이나 이물질 부착 등을 확인한다.
- 3) 유효기간의 경과여부를 확인한다.
- 4) 사용 전 용기를 흔들어서 사용한다.

#### 2. 사용방법

- 1) 병의 뚜껑을 엽니다.
- 2) 몸과 병의 거리를 넓히고 용기의 측면을 눌러 분말이 나오는지 압력테스트를 합니다.
- 3) 가볍게 코를 풀어줍니다.
- 4) 숨을 내쉽니다.
- 5) 한쪽 콧구멍을 손가락으로 막습니다.
- 6) 다른 콧구멍에 브레스윗 알러지 블로커 노즐을 배치합니다.
- 7) 용기의 측면을 눌러 분말을 분무하고 신속하고 부드럽게 흡입합니다. 비강에 분말이 막을 형성할 수 있게 2초 정도 기다립니다.
- 8) 반복하여 다른 콧구멍에 4~7단계를 반복합니다.
- 9) 1일 3회(최소) 사용을 권장합니다.
- 10) 정원이나 먼지가 많은 곳에 들어가기 전에 사용을 권장합니다.
- 11) 매 사용시 마다 사용 전 코를 풀고 사용합니다.

#### 3. 사용 후 보관 및 관리방법

사용 후에는 뚜껑을 잘 닫고 실온에서 보관한다.

**포장단위** 500mg / 병

**저장방법** 고온 및 다습한 곳은 피하고 25℃ 이하에서 보관하십시오.

**사용기간** 제조일로부터 3년 / 개봉 후 6개월

### 사용시 주의사항

1. 18개월 미만의 영유아에게는 사용하지 않습니다.
2. 이 제품의 구성성분(셀룰로오스, 민트향)에 민감한 경우 이 제품을 사용하지 않습니다.
3. 눈 및 열린 상처 부위는 피하여 사용하십시오.
4. 파우더가 눈에 들어간 경우물로 씻어 내십시오.
5. 오염 방지를 위하여 이 제품을 공동으로 사용하지 않습니다.
6. 캡 밀봉(seal)이 파손된 경우 사용하지 않습니다.
7. 임신 및 모유 수유 여성, 어린이는 의사 주의 하에 사용하는 것이 적합합니다.
8. 다른 비강 스프레이 제품과 함께 사용할 경우, 다른 제품을 사용한 이후 본 제품을 사용하여 형성된 방어막이 손상되지 않도록 하십시오.
9. 제품을 처음 사용하는 경우 비강 내 불편감이나 작열감, 가벼운 재채기가 일시적으로 나타날 수 있습니다.
10. 비강 막에 염증이 있을 경우 일시적으로 인후 자극이 있을 수 있습니다.
11. 제품을 사용했을 때 물리적 방어막인 겔층 형성으로 인하여 개인에 따라 코가 막힌 듯한 느낌이 있을 수 있으며, 제품을 과도하게 사용할 경우 개인에 따라 코막힘을 일으킬 수 있습니다.
12. 드물게 코막힘, 콧물, 재채기 및 인후통과 같은 정도의 반응이 나타날 수 있으며, 이보다 심한 이상반응이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 증상이 지속될 경우 의사와 상담하십시오.
13. 본 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
14. 직사광선을 피하고 청결한 곳(실내 전열장등)에 보관하십시오.

**수입업자** 한국메나리니(주)  
서울특별시 강남구 테헤란로 411, 12층  
(삼성동, 성담빌딩) 소비자상담 : 02-2037-7399

**제조외리자** Nasaleze International Ltd  
영국, Second Floor, East Wing Nunery Mills, Old Castletown Road Douglas Isle of Man IM2 1QA, British Isles

**제조사** Nasaleze Limited  
영국, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE British Isles

첨부문서 작성연월 : 2022년 9월  
자세한 제품정보 및 허가 정보는 제품 홈페이지 (www.brethwit.com) 또는 식물의약품안전처 의료기기전자민원창구 (http://emed.mfds.go.kr)를 참조하여 주십시오.

2021MEN-0259-2  
NASA-ALL-KR 09/22

# BRETHWIT® ALLERGY BLOCKER

바른  
사용을 위한  
**BRETH  
TIP**

- 알러지 유발 물질에는 크게 먼지, 꽃가루, 애완동물 털, 집먼지 진드기 등이 있습니다.
- 1병은 약 200회의 분무가 가능합니다.
- 1회 분사시에 약 4-6시간 동안 방어막이 유지됩니다.\*

## 쉽게 보는 브레스윗 알러지 블로커 사용법



### STEP 1

가볍게 코를 풀어줍니다.



### STEP 2

뚜껑을 닫은 채 제품을 흔들어 줍니다.



### STEP 3

적절한 분무를 위해 테스트해봅니다.  
(10cm~15cm 정도로 분무되는 양이 이상적입니다.)  
※사용에 익숙해지면 분무 테스트를 따로 할 필요 없습니다.



### STEP 4

양쪽 콧구멍에, 1-2회 분무해줍니다.  
분사시에 부드럽게 숨을 들이쉽니다. (너무 깊게 들이쉬지 말아주세요.)



### STEP 5

1회 사용시 4-6시간 효과가 지속되며, 필요에 따라 사용을 권장합니다.

Ref 1) B.Diehart, et al / Hydroxypropylmethylcellulose gel application delays Cry j 1, Amb a 1 and Der p 1 diffusion in vitro / Natural Science 2 (2010) 79-84



C M Y K

IPM No.: 2021MEN-0259-2

Product Name: Brethwit Allergy Blocker Mint Nasal Spray 800mg Insert

Country: KR

Version: 2

Date : 05 October 2022